



LP-ESP VERSTELLBARER EINSETZER 12 MM
GEBRAUCHSANLEITUNG


LP·ESP
Lumbale Prothese




LP-ESP verstellbarer Einsetzer 12 mm: Ref: 270 517




0 mm

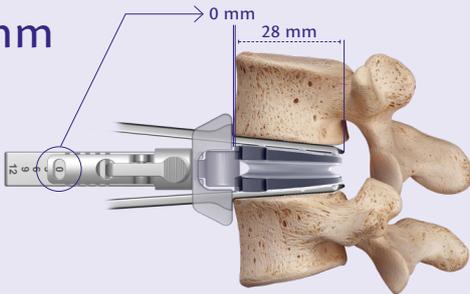


3 mm

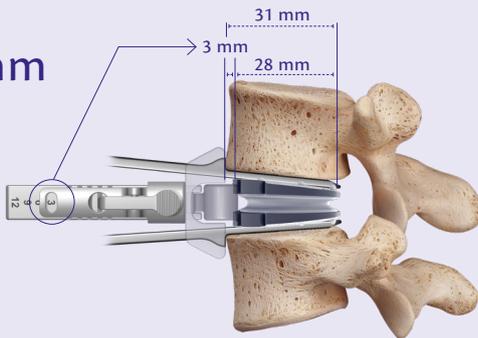

6 mm

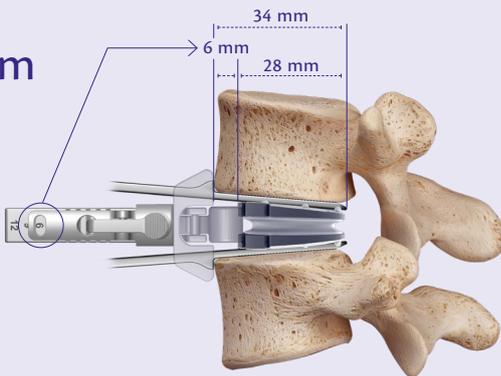

9 mm

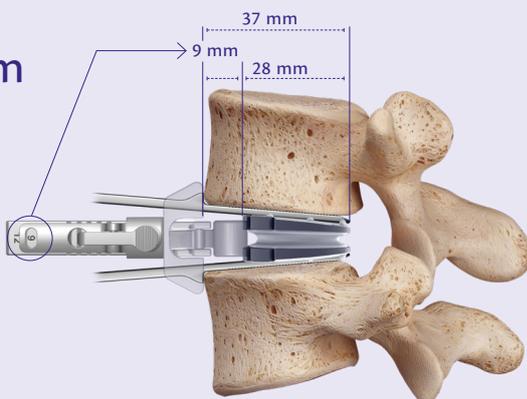

Das Instrument ermöglicht die Prothese in der gewählten anteroposterioren Positionierung zu implantieren.

Zur Erinnerung: Die anteroposteriore Abmessung der Prothese beträgt 28 mm.



Wichtig: Die anteroposteriore Tiefe der Wirbelkörperendplatten sollte präoperativ bestimmt werden, um die geeigneten Instrumentenblätter zu verwenden. **Die Länge des Blattes muss immer kleiner oder gleich der Tiefe des Wirbels sein.** Die Verwendung eines zu langen Blattes könnte zu Schäden an den Nervenstrukturen sowie der Dura führen. Siehe nachstehende Korrelationstabelle.

Prothesen-abmessung AP (mm)	Einstellung des Gleitanschlags (mm)	Entsprechende Blätter (mm)
28	0	28
	3	31
	6	34
	9	37
	12	40*




*Instrument ist während der Markteinführungsphase nicht verfügbar

Bezeichnung	Ref.
LP-ESP verstellbarer Einsetzer 12 mm	270 517
LP-ESP modulares Blatt 28 mm	270 518
LP-ESP verstellbarer Einsetzer L. 31 mm	270 519
LP-ESP verstellbarer Einsetzer L. 34 mm	270 520
LP-ESP verstellbarer Einsetzer L. 37 mm	270 521




LP-ESP VERSTELLBARER EINSETZER 12 MM
GEBRAUCHSANLEITUNG

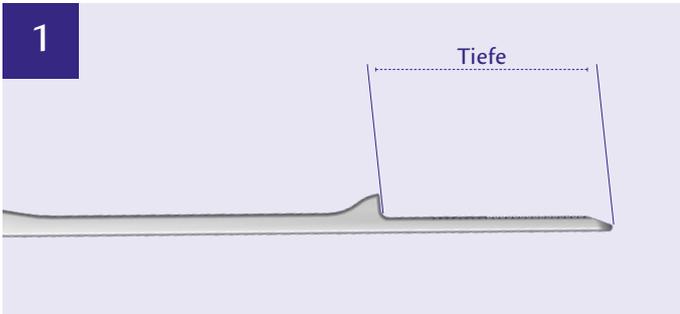


1

BLATTAUSWAHL
Entsprechend der zuvor bestimmten Tiefe der Wirbelkörperendplatten (siehe Tabelle)

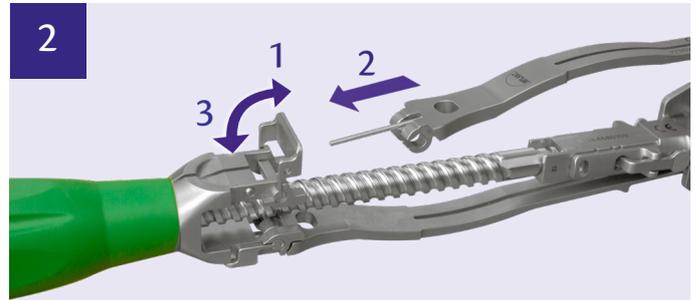


2

MONTAGE DER GEWÄHLTEN BLÄTTER AN DEN EINSETZER
1. Oberen und unteren Hebel anheben.
2. Modulare Blätter einschieben, während die Hebel oben gehalten werden.
3. Hebel herunterdrücken, um die Blätter zu verriegeln.

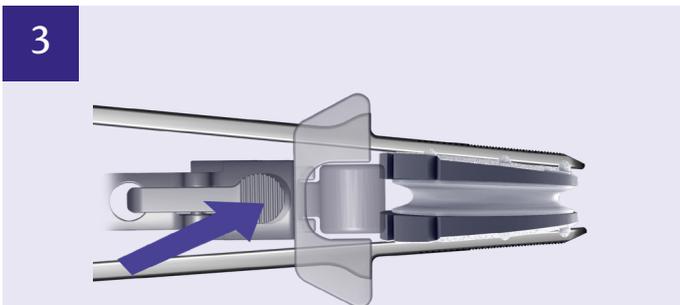



3

1. Beidseitig auf den Einsetzer drücken.

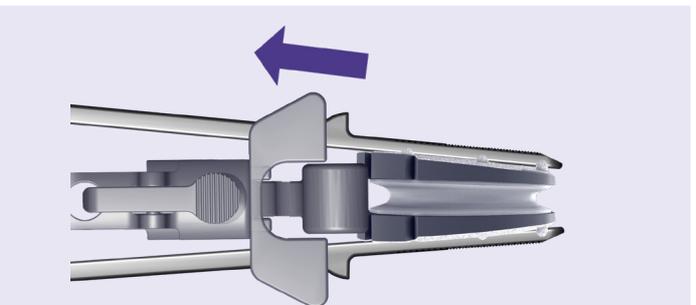

2. Den Stopp an die gewählte Position schieben: 0, 3, 6, 9 oder 12 mm (siehe Tabelle).

EINSTELLEN DES MILLIMETERGENAUEN GleITANSCHLAGS AUF 0, 3, 6, 9 ODER 12 MM

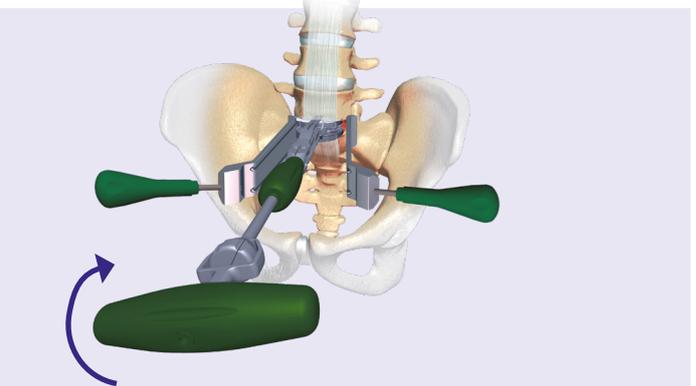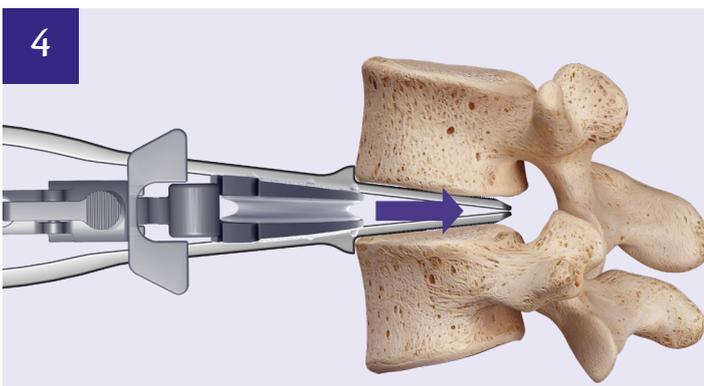

4

EINBRINGEN DER PROTHESE ZWISCHEN DIE WIRBELKÖRPER